



**Stoltrapphiss
för svängd trapp**

Leo & Leo XL^{160kg}

Globus Leo & Leo XL



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade



Globus Leo - stolhiss för svängd trappa

Att låta installera en Globus Leo stoltrapphiss är ett enkelt sätt att öka tillgängligheten i hemmet, även på längre sikt. "Att framtids-säkra tillgängligheten i hemmet" skulle man kunna säga.

Inner- eller ytterkurva

Stolhissen kan monteras valfritt i såväl inner-/ som ytterkurva beroende på trappens stigningsgrad. Den slimmade designen gör att intrånget i trappan minimeras. Mellan gångerna den används kan den vikas ihop och parkeras. Den slimmade profilen gör att den inte innebär ett hinder för andra som använder trappan.



Vridbar stol

Den vridbara stolen gör det lätt och säkert att sätta sig på och kliva av från stolen. För ytterligare trygghet och säkerhet finns som tillval automatisk vridning av stolen respektive eldriven uppfällning av fotplattan.

Mjukstart/-stopp

Funktionen "mjukstart/-stopp" säkerställer att åkturen börjar och slutar på ett mjukt och komfortabelt sätt.

Stadig gång

Stolhissen har två skenor och ett mekaniskt system för att hålla stolen vågrät i alla lägen. Detta ger en varsam och stadig färd även i svängar och hörn.

Leo XL

Leo XL klarar hela 160 kg och kan fås med 590 mm mellan armstöden.




Lättanvända styrkontroller

Den joystick som finns på stolen för att styra färderna kan monteras valfritt på höger eller vänster armstöd (beroende på om man är höger- eller vänsterhänt). Fjärrkontroller sätts vid stannplanen nere och uppe, så att man kan kalla till sig hissen.



Säkerhet

Klämskydd finns på fotplatta och motorenhet för att stoppa hissen om den stöter på något hinder under färd. Hissen är utrustad med ett säkerhetsbälte av rullbältestyp. Genom nyckellåsningen av hissen kan man begränsa oönskad användning.

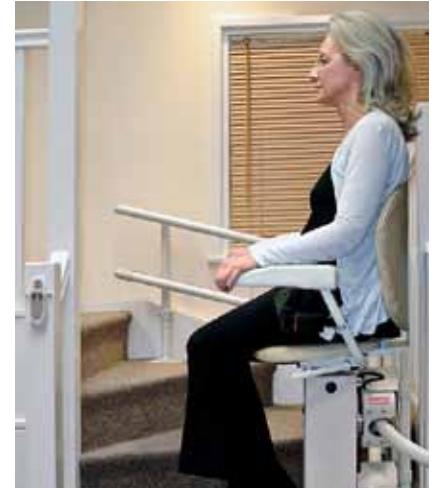

Batteridrift

Den batteridrivna stolhissen gör att man kan åka i trappan även om det är tillfälligt strömavbrott. Stolhissens batterier återladdas då den inte används och står vid en laddstation.

OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

Välutbyggd service - För er trygghet!


I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår riks-täckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi servar alla fabrikat av specialhissar.

Serviceanmälan


Tel 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)
Jourutryckning endast för er som har jouravtal.

E-mail felanmalan@globustt.se
Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.

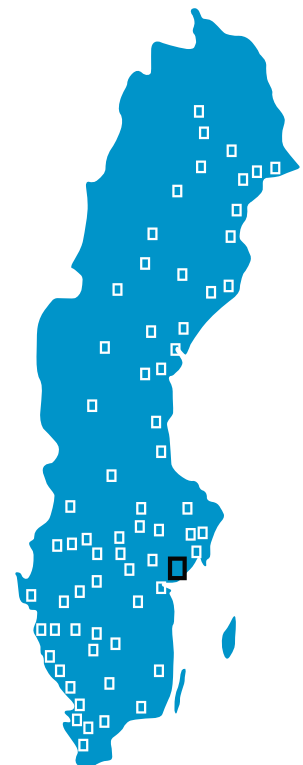

□ Huvudkontor □ Service/jourkontor

Måttuppgifter

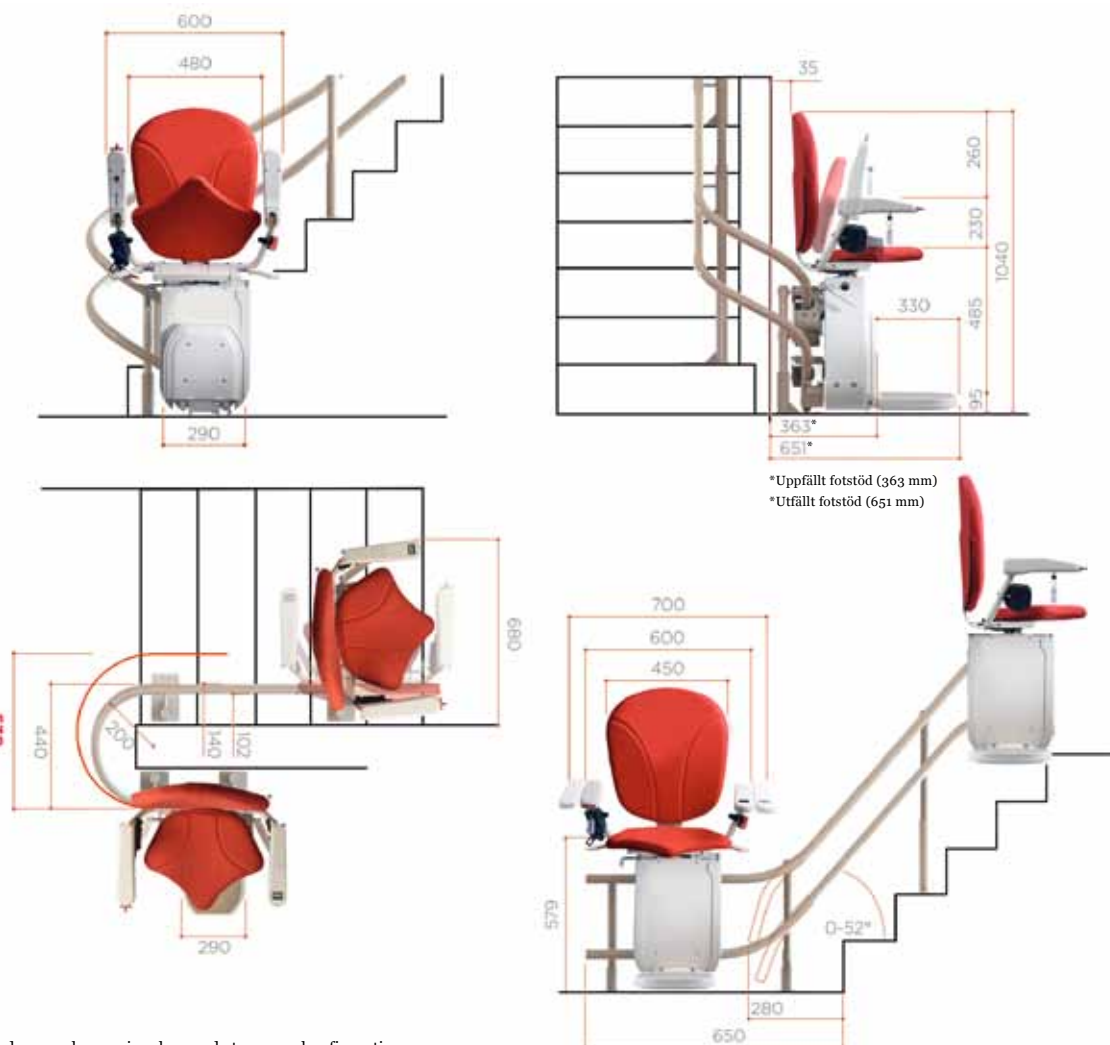

Alla mått är i mm.
Det är nominella värden som kan variera beroende trappans konfiguration.

Teknisk data

Lyftkapacitet	120 kg (Leo)
Lyftkapacitet	160 kg (Leo XL)
Lyftshastighet	0,15 m/sek
Ytbehandling	
Åkskenor	Pulverlackerade RAL 1013
Manöverpanel	På stolen samt på stannplanen

Drivsystem	Batteri, kuggstång
Elanslutning	1-fas, 2,5 A för batteriladdare
Batterier	2 x 12 V, 8,5 Ah
Motor	24 V DC
Stigning	0°-52°

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®