



**Stoltrapphiss  
för rak trapp**

# Lupus

**LAGERVARA!**

**INSTALLATION  
NORMALT INOM  
1-2 VECKOR**

**UTOMHUSINSTALLATION  
136-160 KG**

## Tillbehör Lupus Extra

### Automatisk vridsits

Automatisk stolsvridning vid övre plan innebär en ökad säkerhet då den som använder hissen per automatik vrids in över stannplanet genom att fortsätta hålla den s.k. joysticken.

Om automatisk stolsvridning används finns det inga risker att

stolen ej är låst i sitt vridläge. Det innebär att det inte finns någon risk att stolen rör sig vid i- och urstigning.

**Bara möjligt när man har en stol med automatisk vridning att justera sitthöjder**

**Innan sitshållaren monteras är det möjligt att justera sitthöjden i följande intervaller:**

Position 1: Från 420 mm

Position 2: 420 – 435 mm

Position 3: 435 – 450 mm

Position 4: 450 – 465 mm (standard)

Position 5: Max 465 mm



**Lyftkapacitet**

136 kg vid 28°–53°

**Lyftkapacitet**

160 kg vid 28°–45°

**Lyftkapacitet Fällskena**

145 kg vid 28°–45°

136 kg vid 28°–53°

### Fällskena

Fällskena används oftast när dörr eller öppning ligger närmare trappan än 500 mm.

Fällskenan innebär att när hissen används så kommer skenan att sticka ut i öppningen och omvänt, när hissen inte används så fälls den nedersta delen av skenan upp och ser därmed till att inget hinder finns i öppningen.

### Lättanvända styckontroller

Den joystick som finns på stolen

för att styra färden kan monteras valfritt på höger eller vänster armstöd (beroende på om man är höger- eller vänsterhänt). Fjärrkontroller sätts vid stannplanen nere och uppe, så att man kan kalla till sig hissen.

### Säkerhet

Klämskydd finns på fotplatta och motorenhet för att stoppa hissen om den stöter på något hinder under färd. Hissen är utrustad med ett säkerhetsbälte av rullbältestyp.

Genom nyckellåsningen av hissen kan man begränsa oönskad användning.

### Batteridrift

Den batteridrivna stolhissen gör att man kan åka i trappan även om det är tillfälligt strömavbrott. Stolhissens batterier återladdas då den inte används och står vid en laddstation.



## OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

### Välutbyggd service - För er trygghet!


I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår riktäckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi servar alla fabrikat av specialhissar.




### Serviceanmälan

**Tel** 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)  
*Jourutryckning endast för er som har jouravtal.*

**E-mail** felanmalan@globustt.se  
*Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.*

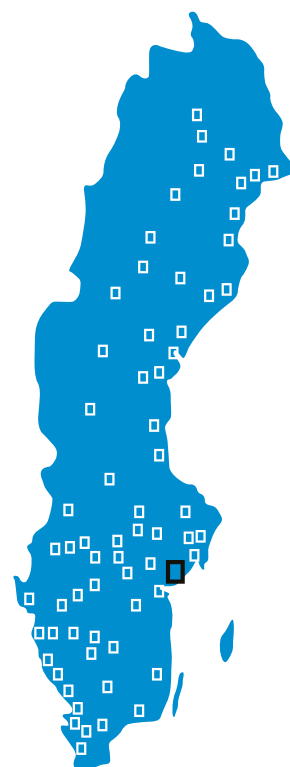

■ Huvudkontor    ■ Service/jourkontor

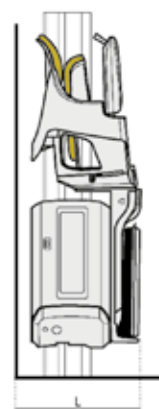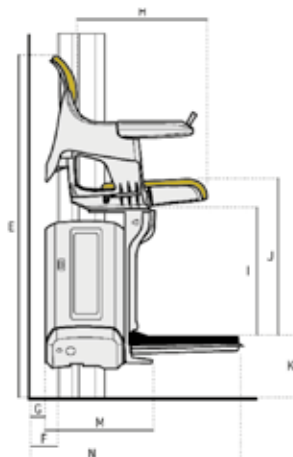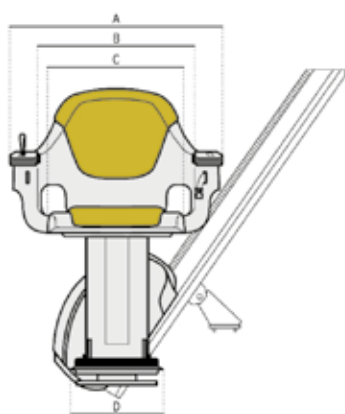

## Måttuppgifter

|          |        |          |        |          |        |          |        |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| <b>A</b> | 655 mm | <b>E</b> | 963 mm | <b>I</b> | 400 mm | <b>M</b> | 598 mm |
| <b>B</b> | 485 mm | <b>F</b> | 74 mm  | <b>J</b> | 478 mm | <b>N</b> | 632 mm |
| <b>C</b> | 422 mm | <b>G</b> | 34 mm  | <b>K</b> | 115 mm |          |        |
| <b>D</b> | 295 mm | <b>H</b> | 410 mm | <b>L</b> | 368 mm |          |        |



### Vridsits manuell (standard)

Vridsitsen erbjuder en säker position för av- och påstigning vänd mot stannplanet och bort från trappan. Låsspaken nås från båda sidorna på stolen för bekväm manövrering av vridsitsen.



### Körkontroll

Hissen körs från armstödet med en lättanvänd joystick. Med ett lätt tryck åt höger eller vänster väljer du om du vill åka uppför eller nerför trappan.




### Säkerhetsbälte

Säkerhetsbälte med enkelt "klick"-lås finns alltid till hands.

### Tillbehör

Telefon.  
Automatisk vridning av sits vid övre stannplan.

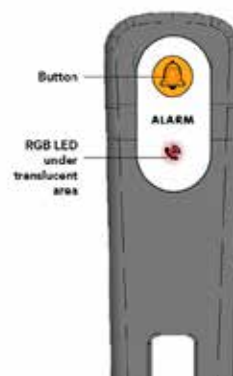

### Tillbehör

Utomhusinstallation.

Max 7,5 meter. Temperatur max -15°.  
Hissen ska alltid parkeras under tak på

övre plan för att motverka att vatten och is rinner in i drivmaskineri. När den inte används täcks stolen med överdrag för att skydda mot regn.



## Teknisk data

|                                |                                                        |                     |                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>Lyftkapacitet</b>           | 136 kg vid 28°–53°                                     | <b>Manöverpanel</b> | På stol samt på stannplanen    |
| <b>Lyftkapacitet</b>           | 160 kg vid 28°–45°                                     | <b>Drivsystem</b>   | Batteri, kuggstång             |
| <b>Lyftkapacitet Fällskena</b> | 145 kg vid 28°–45°                                     | <b>Elanslutning</b> | 1-fas 1 Amp för batteriladdare |
|                                | 136 kg vid 28°–53°                                     | <b>Batterier</b>    | 2 x 12 V, 7 Ah                 |
| <b>Lyfthastighet</b>           | 120 mm/sek                                             | <b>Motor</b>        | 24 V DC                        |
| <b>Åkskena</b>                 | Aluminium, anodiserad.<br>Max 10 m. Utomhus max 7,5 m. | <b>Stigning</b>     | 28°–53°                        |

**Globus TT AB**  
Svalstavägen 1  
611 50 Nyköping

**Tel** 0155-20 55 00  
**E-mail** info@globustt.se  
www.globustt.se

**GLOBUS**  
**DIREKT**

**Tel** 0155-20 55 00  
Kvalitetsservice när  
du behöver det.

**GRÖNA**  
**GLOBUS**

**Tel** 0155-20 55 00  
Återanvändning på  
ett miljöriktigt sätt.

**Globus**  
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®