



**Stoltrapphiss
för rak trapp**

Lupus 160

LAGERVARA!

**INSTALLATION
NORMALT INOM
1-2 VECKOR**

**UTOMHUSINSTALLATION
160 KG**

Globus Lupus 160

Tillbehör Lupus 160

Automatisk vridsits

Automatisk stolsvridning vid övre plan innebär en ökad säkerhet då den som använder hissen per automatik vrids in över stannplanet genom att fortsätta hålla den s.k. joysticken.


Om automatisk stolsvridning används finns det inga risker att

stolen ej är låst i sitt vridläge. Det innebär att det inte finns någon risk att stolen rör sig vid i- och urstigning.

Hissen är försedd med vridbar:

Standard manuell vridning vid övre plan 90° och vid nedre plan 35°. Option: Automatisk vridning vid övre plan 90° och den kommer

också att kunna vridas 35° längst ned men endast via den manuella spaken (inte den elektriska vridknappen).

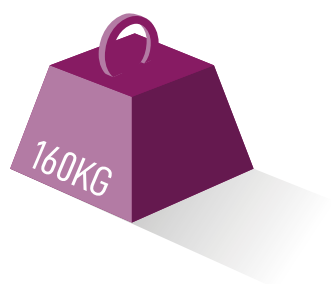

Lyftkapacitet

160 kg

Fällskena

Fällskena används oftast när dörr eller öppning ligger närmare trappan än 500 mm.

Fällskenan innebär att när hissen används så kommer skenan att sticka ut i öppningen och omvänt, när hissen inte används så fälls den nedersta delen av skenan upp och ser därmed till att inget hinder finns i öppningen.

Lättanvända styckontroller

Den joystick som finns på stolen för

att styra färdan kan monteras valfritt på höger eller vänster armstöd (beroende på om man är höger- eller vänsterhänt). Fjärrkontroller sätts vid stannplanen nere och uppe, så att man kan kalla till sig hissen.

Säkerhet

Klämskydd finns på fotplatta och motorenhet för att stoppa hissen om den stöter på något hinder under färd. Hissen är utrustad med ett säkerhetsbälte av rullbältestyp.

Genom nyckellåsningen av hissen kan man begränsa oönskad användning.

Batteridrift

Den batteridrivna stolhissen gör att man kan åka i trappan även om det är tillfälligt strömavbrott. Stolhissens batterier återladdas då den inte används och står vid en laddstation.



OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

Välutbyggd service - För er trygghet!


I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår riktäckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi servar alla fabrikat av specialhissar.

Serviceanmälan

Tel 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)
Jourutryckning endast för er som har jouravtal.

E-mail felanmalan@globustt.se
Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.

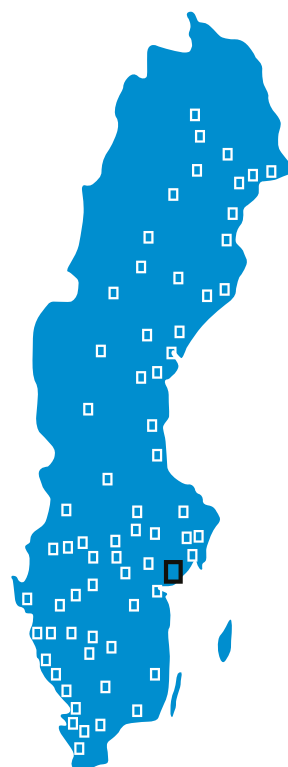

■ Huvudkontor ■ Service/jourkontor




Globus Lupus 160

Justerbart säte

Armstöden, ryggstödet och stolsdynan kan justeras för att passa användaren.



Globus Lupus 160

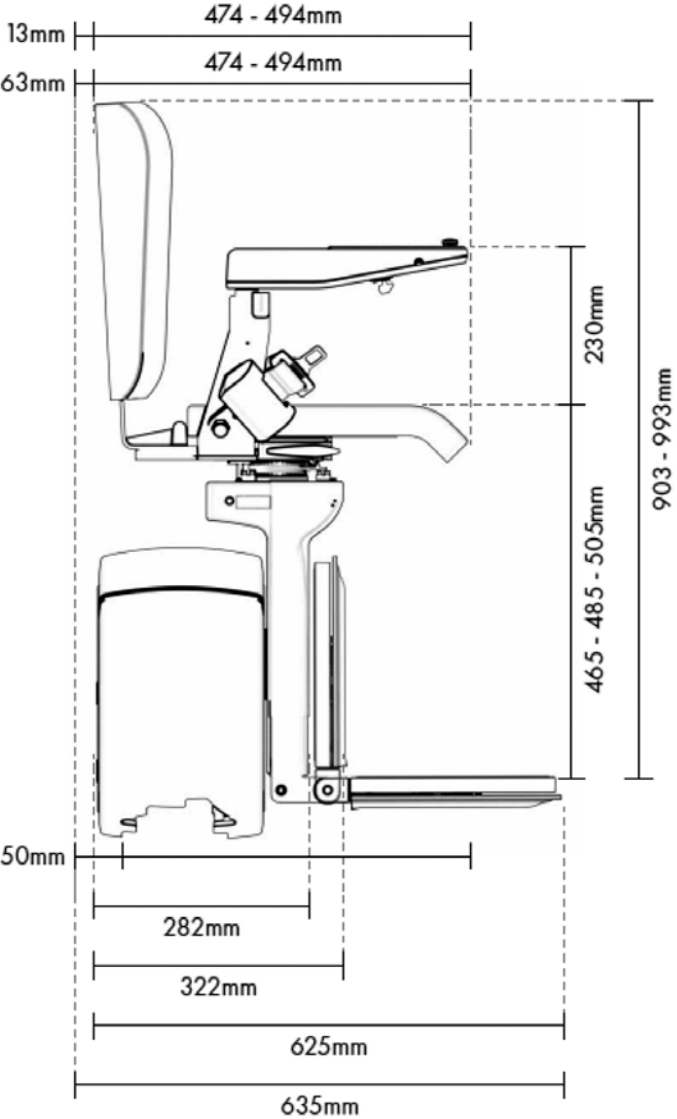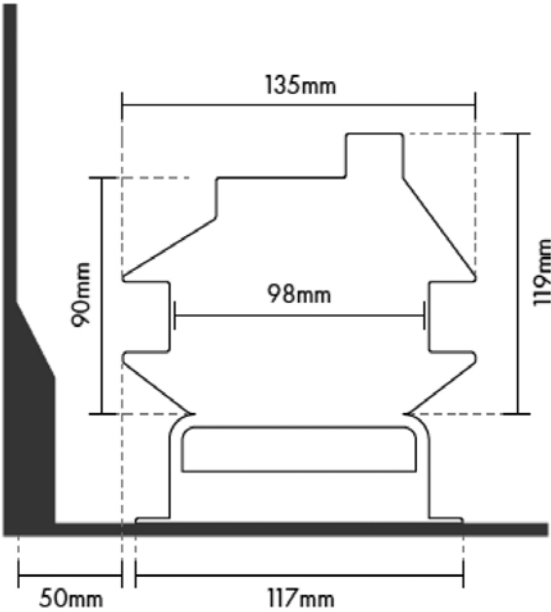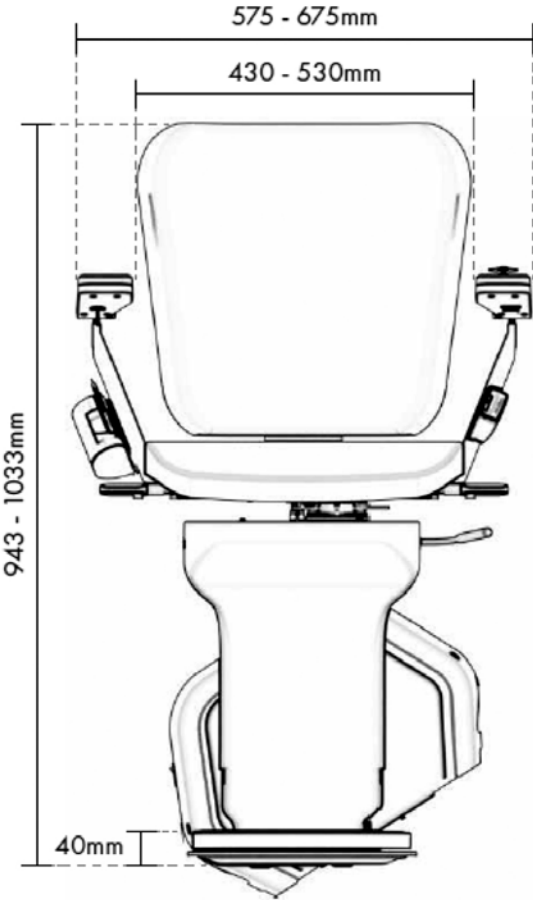



Körkontroll

Hissen körs från armstödet med en lättanvänd joystick. Med ett lätt tryck åt höger eller vänster väljer du om du vill åka uppför eller nerför trappan.

Säkerhetsbälte

Säkerhetsbälte med enkelt "klick"-lås finns alltid till hands.

Tillbehör

Telefon. Automatisk vridning av sits vid övre stannplan.

Tillbehör

Utomhusinstallation.

Max 7,5 meter. Temperatur max -15°.

Hissen ska alltid parkeras under tak på

övre plan för att motverka att vatten och is rinner in i drivmaskineri. När den inte används täcks stolen med överdrag för att skydda mot regn.



Teknisk data

Lyftkapacitet	160 kg
Lyfthastighet	120 mm/sek
Åkskena	Aluminium, anodiserad. Max 10 m. Utomhus max 7,5 m.
Manöverpanel	På stol samt på stannplanen

Drivsystem	Batteri, kuggstång
Elanslutning	1-fas 1 Amp för batteriladdare
Batterier	2 x 12 V, 7 Ah
Motor	24 V DC
Stigning	0°–62°

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®